

Vous venez de prendre possession d'un appareil d'orthopédie qui vous a été délivré par ICEO Orthopédie

L'Orthèse de membre inférieur

Description :

L'orthèse de jambe est adaptée par l'orthoprothésiste de votre enfant en fonction de la prescription médicale de votre médecin, de la morphologie et l'activité quotidienne de votre enfant.

L'orthèse peut être, soit de posture, soit de correction pour aider à la marche.

C'est un dispositif sur-mesure qui ne peut être utilisé que par votre enfant.

Pourquoi une notice ?

Cette notice vous apprendra à bien connaître l'appareil de votre enfant et à en observer les règles élémentaires d'utilisations, dans le respect des obligations prescrites par votre médecin, conformément à la réglementation en vigueur 2017 / 745.

Pour profiter de son efficacité maximale dans les conditions de sécurité optimale, il vous revient d'en surveiller l'état et de faire effectuer les contrôles nécessaires auprès de votre orthoprothésiste ICEO.

Ces précautions prolongeront la vie de cet appareil la santé et le bien-être de votre enfant.

Bonne lecture !

N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.

MODELE

- Orthèse cruro-jambière
- Orthèse genou
- Orthèse supra-malléolaire
- Orthèse suro-pédieuse

PORT DE L'APPAREILLAGE

- JOUR
- NUIT

COMPOSITION :

- Anti-dérapant
- Chausson plastique
- Garnissage
- Rappel élastique
- Renfort mousse
- Transfert
- Trou d'aération
- Velcro

MATERIAU :

- Alliage métallique
- Colle Néoprène
- Cuir
- Fibres textiles
- Mousse de Garnissage
- Plastique

Fonctionnement :

- L'orthèse est appliquée sur le membre inférieur et maintenue en place par des sangles ou un laçage.
- Les sangles sont auto-agrippantes. Le laçage se fait par œilletons ou crochets.
- L'orthèse peut être totalement rigide ou articulée.
- Les articulations peuvent comporter un verrou ou une limitation d'amplitude.

Utilisation :

➤ Conformez-vous strictement à la prescription médicale

Ce dispositif médical a été réalisé par la Société ICEO et respecte la prescription médicale prescrite par le Docteur

➤ Mise en place

- S'allonger ou s'asseoir confortablement, mettre éventuellement un jersey tubulaire,
- Ouvrir l'orthèse,
- Placer la jambe ou le pied à l'intérieur,
- Serrer convenablement les sangles,
- Mettre la chaussure si nécessaire.

Précautions d'emploi :

- L'orthèse a été réglée en fonction de la hauteur du talon des chaussures de votre enfant. En cas de changement, un réglage peut être fait.



Charte Ortho Team

Les membres adhérents du groupe ortho team, tous professionnels paramédicaux, spécialistes de l'Orthoprothèse et/ou de l'Orthopédie Orthèse s'engagent à respecter et à faire respecter dans leurs entreprises les 12 règles suivantes dans leur intégralité.

Garantie - Contrat :

Si l'orthèse de membre inférieur identifiée dans cette notice devait présenter un défaut de fabrication ou de matériau, durant les 3 mois suivants son acquisition, nous procéderions gratuitement à la remise en état ou au remplacement de l'élément défectueux.

Les pièces détachées d'origine sont garanties dans les délais et les conditions d'utilisation et de révision déterminés par le fabricant.

*Cette garantie est valable auprès de tous les membres du groupe **Ortho Team** sur présentation de ce document.*

Un forfait « frais de réparations » est pris en charge par le régime obligatoire. En cas de dépassement de ce forfait, une prescription médicale sera demandée.

1. Assurer la meilleure qualité » d'accueil, d'écoute et de conseil au patient.
2. Garantir le meilleur choix d'appareillage en toute objectivité dans l'intérêt unique du patient.
3. Garantir la meilleure qualité des appareils délivrés.
4. Assurer le meilleur service et la plus grande disponibilité qu'est en droit d'attendre le patient.
5. Assurer le suivi d'un appareillage réalisé par un confrère membre du groupe et appliquer les garanties nationales propres au groupement.
6. Respecter la libre concurrence et entretenir les meilleures relations avec l'ensemble des confrères de nos professions
7. Entretenir avec le milieu médical et paramédical un dialogue professionnel et constructif pour une parfaite coordination dans l'intérêt du patient.
8. Entretenir avec les administrations et organismes de prises en charge, des relations régulières, constructives et courtoises.
9. Être ouvert à toute innovation technologique, se donner les moyens d'en acquérir la maîtrise et utiliser celle-ci au service des patients.
10. Favoriser la formation de son personnel aux techniques nouvelles en matière d'appareillage.
11. Faire face aux obligations légales afférentes aux entreprises et respecter la législation en vigueur.
12. Manifester jour après jour honnêteté, correction et savoir-vivre.

Notice d'utilisation

Orthèse de Membre inférieur